

**Биоимплантаты из компонентов соединительных тканей для детской и взрослой травматологии и ортопедии**

Инструкция по медицинскому применению

**Торговое название:** ЛИОПЛАСТ®

**Вид консервации:** лиофилизация

**Вид стерилизации:** гамма-лучи

**Применение:** перед использованием провести регидратацию в физ. растворе с антибиотиком широкого спектра действия:

Сухожилия, тракт	не более 20-30 мин.
Спонгиозная крошка	можно не регидратировать или до 5мин.
Большие фрагменты (проксимальный, дистальный отделы, диафизы (15-20 см) бедра и большеберцовой кости )	18-24 ч.
Диафизы бедра, большеберцовой кости (до 12 см)	10-18 ч.
Кортикальные распорки большие (15-20 см) недеминерализованные	18-24 ч.
Кортикальные распорки маленькие (до 12 см)	12-18 ч.
Кортикальные распорки деминерализованные	30-40 мин.
Губчатые блоки, цилиндры	15-30 мин.
Бикортикал, трикортикал	5 – 15 мин.
Фрагменты челюсти	15-30мин.
Порошок	Не регидротруется

Рекомендуем для проведения регидратации больших фрагментов брать:

1300мл. физ. раствора и 10 флаконов антибиотика широкого спектра действия.

Для блоков и спонгиозной крошки - 100мл. физ раствора и 1 флакон антибиотика

**Условия хранения:** при комнатной температуре, в сухом защищенном от света месте.

**Срок годности:** 3 года с момента стерилизации.

---